

Kit Kudzu Bracelet

Plastifiants / Pesticides

Lire attentivement ce document avant de débuter votre prélèvement.

1 Vérifiez le contenu de votre kit Kudzu

Si vous ne réalisez pas votre prélèvement immédiatement, ne déballez pas le matériel.

Votre kit Kudzu Bracelet contient :



Une boîte en aluminium avec couvercle contenant un bracelet en silicone blanc ou gris. *À conserver jusqu'à la fin du prélèvement.*



Une carte mémo, indiquant l'identifiant de votre kit. *À conserver précieusement*



Une pochette en papier avec fiche de prélèvement pour identifier votre échantillon. *À conserver jusqu'à la fin du prélèvement.*




Une enveloppe retour prépayée pour l'envoi de votre prélèvement à Kudzu Science (uniquement depuis la France métropolitaine).

2 Réalisez votre prélèvement



1 Sortez le bracelet de la boîte en aluminium.
Conservez la boîte et le couvercle car ils sont indispensables pour l'envoi de votre prélèvement au laboratoire.

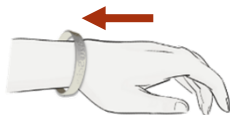

2 Placez le bracelet à votre poignet.
Votre prélèvement débute.
Continuez à vivre normalement : gardez-le tout le temps (même pour dormir et pour vos soins d'hygiène corporelle).




3 Complétez les informations de prélèvement sur la pochette en papier.

3 Votre prélèvement est terminé



Le délai de 7 jours est écoulé.

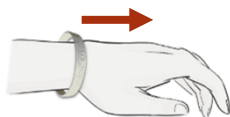

1 Retirez le bracelet de votre poignet et placez-le directement dans la boîte en aluminium. Fermez la boîte à l'aide de son couvercle.



2 Terminez de compléter les informations de prélèvement puis insérez la boîte en aluminium contenant le bracelet dans la pochette en papier.



Attention : De la fin du prélèvement à l'envoi au laboratoire, il est recommandé de **conserver le prélèvement au réfrigérateur**.

4

Dès que possible : renvoyez votre prélèvement au laboratoire



1

Préparez l'enveloppe retour prépayée.

Vous pouvez noter le numéro de Lettre Suivie pour suivre l'acheminement de votre prélèvement vers le laboratoire.

2

Glissez-y la pochette contenant votre prélèvement.

3

Fermez l'enveloppe et déposez-la dans une boîte aux lettres ou dans un bureau de Poste près de chez vous.

5

Consultez vos résultats

Vos résultats sont disponibles sous 15 jours ouvrés après réception de votre prélèvement au laboratoire.



Pour consulter votre rapport d'analyse :

1

Rendez-vous sur www.kudzuscience.com

2

Cliquez sur « Mon kit Kudzu ».

3

Saisissez l'identifiant à 12 caractères inscrit sur votre carte mémo et cliquez sur « Continuer ».

4

Téléchargez votre rapport d'analyses.

Vous avez une question ? Besoin d'un renseignement ou d'un conseil ?

N'hésitez pas à contacter notre Service Client par email à l'adresse info@kudzuscience.com ou par téléphone au **03.69.61.46.00**.